



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА МЕДИЦИНСКИЙ СОРБИРУЮЩИЙ СУГЛЕРОДНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Изготовитель: ОАО «СветлогорскХимволокно»,
Адрес изготовителя: Республика Беларусь, 247439,
г. Светлогорск, Гомельская обл., ул. Заводская 5
Тел. + 375 2342 94865, факс + 375 2342 70270,
e-mail: sohim@sohim.by

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лечение на начальной стадии ожоговых, гнойных, вялозаживающих, осложненных послеоперационных ран, трофических язв, свищей, пролежней. Углеродная подушечка обладает значительной капиллярной активностью. Сорбирует микроорганизмы, химические вещества, гнойные выделения. Облегчает боль, поглощает запах, не травмирует поверхность раны при перевязках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружно. Открыть пакет, вынуть пластырь-повязку, снять с его поверхности защитную пленку (бумагу) и приклеить к сухой, чистой коже прижимая края так, чтобы подушечка несколько превышала размер раны. Использовать однократно. Заменяется по мере необходимости.

Не использовать пластырь-повязку при индивидуальной непереносимости компонентов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Перед использованием хранить в неповрежденной упаковке в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от 0 до 25 °С.

СОСТАВ:

Микропористый нетканый материал, клей расплав на основе синтетического каучука, подушечка из углеродной ткани.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности 5 лет от даты стерилизации. Не использовать по истечении срока годности.



Стерилизация проводится
Партия № 10
Дата изготовления
Дата стерилизации

9 × 15 см

СТЕРИЛЬНО



АУТ-М СОРБЕНТ УГЛЕРОДНЫЙ ТКАНЕВЫЙ

углеродные салфетки ранозаживляющие

Используется при лечении
гнойных и вялозаживающих
ран, ожогов, трофических
язв, свищей пролежней,
осложненных послеопера-
ционных ран, при
диабетической стопе.

ТУ РБ 00204056.076

ОАО «СветлогорскХимволокно»

Ул. Заводская 5, 247400, Светлогорск, Гомельская обл, Республика Белару
Тел. + 375 2342 94865, факс + 375 2342 70270, e-mail: sohim@sohim.by
www.sohim.by

